



BINAMED®

Medizinische Silbertextilien

Medical silverwear

Tissus argentés pour utilisation en milieu médical

Indumenti terapeutici contenenti argento

Ropa médica con contenido en plata

Medische zilververbanden

www.binamed.de

Samenstelling materiaal

Binamed® shirt-, broekverband:

43% Modal, 48% Zilvergaren
2% Lycra, 7% Polyamide

Binamed® handschoenen, sokken, arm- en knieverbanden:

79% Modal, 14% Zilvergaren
7% Lycra

Wasvoorschrift bij de speciale Binamed®-verbanden



Gebruik bij het wassen van de speciale Binamed verbandmiddelen altijd een fijnwasmiddel. Was op een maximale temperatuur van 60 °C.. Een hogere temperatuur is vanwege de antibacteriële eigenschappen van dit speciale textiel niet nodig. Gebruik in geen geval desinfectiemiddelen, chloorbevattende reinigingsmiddelen of wasverzachter.

De fabrikant en leverancier zijn niet aansprakelijk voor schade of letsel wegens onjuist gebruik.



De Binamed®-verbanden mogen niet gebleekt worden en niet met chloor in contact komen. Chloor kan de zilverlaag aantasten waardoor de werking verloren kan gaan.



Doe de Binamed®-verbanden niet in de droger. Direct contact met een hittebron kan de speciale verbanden beschadigen.



Strijk de Binamed®-verbanden op matige temperatuur en zonder stoom. Rechtstreeks contact met een hittebron kan de speciale verbanden beschadigen.



Binamed®-verbanden niet chemisch laten reinigen.

Belangrijke aanwijzingen bij dit product

- Was de Binamed®-verbandmiddelen voordat ze voor het eerst gedragen worden.
- Speciaal textiel van Binamed® vóór het wassen niet binnenstebuiten draaien.
- De Binamed®-verbandmiddelen mogen nooit rechtstreeks in contact komen met (elektrische) warmtebronnen (bijv. radiatoren, elektrische dekens, haardrogers, etc.).
- De Binamed®-verbandmiddelen mogen als ze nat zijn niet met metalen voorwerpen (bijv. metalen kledinghangers) in aanraking komen.
- Let op: kleurschakeringen, kleurverschillen en verkleuringen zijn geen fabricagefouten en geen kwaliteitsgebrek.
- Het is van belang om de huid te hydrateren met een goed huidverzorgingsproduct of een crème. Zorg vóór het dragen van Binamed®-verbandmiddelen dat het hydraterende product goed is ingetrokken in de huid.





D/NL	F	I	E	GB
62/68	3-6 MOINS	3-6 MESI	3-6 MESES	6 MONTHS
74/80	6-12 MOINS	6-12 MESI	6-12 MESES	12 MONTHS
86/92	86	86	86	2
98/104	102	102	102	4
110/116	114	114	114	6
122/128	126	126	126	8
134/140	138	138	138	10
146/152	150	150	150	12
158/164	162	162	162	14



	D/NL	GB	F,E	I
S	36/38	10/12	38/40	40/42
M	40/42	14/16	42/44	44/46
L	44/46	18/20	46/48	48/50
XL	48/50	44/46	50/52	54/56
XXL	50/52	48/50	54/56	58/60



	D/NL	F	I	GB
S	44/46	44-38/46-40	38/40	34/36
M	48/50	48-42/50-44	42/44	38/40
L	52/54	52-47/54-50	46/48	42/44
XL	56/58	56-52/58-54	50/52	46/48
XXL	60/62	62/64	66/68	50/52

Made in Germany



Clinical study at PsoriSol Clinic Hersbruck

Binamed Moll GmbH
 Kulmbacher Straße 115 · D - 95445 Bayreuth
 Tel. +49 (0) 9 21 - 7 45 90 · Fax +49 (0) 9 21 - 4 39 40
 info@binamed.de · www.binamed.de

